

PER INFORMAZIONI SULLE CONSEGNE

Numero Verde

800 091346

NUMERO VERDE ASL BAT

Numero Verde

800 067168

NUMERO VERDE ASL BARI

Numero Verde

800 093992

NUMERO VERDE ASL BRINDISI

Numero Verde

800 261734

NUMERO VERDE ASL FOGGIA

Numero Verde

800 429614

NUMERO VERDE ASL LECCE

Numero Verde

800 429614

NUMERO VERDE ASL TARANTO

PER INFORMAZIONI SU PRODOTTI E SERVIZI

Numero Verde

800 692601

ATTIVO DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
24 ORE SU 24



I prodotti Serenity si trovano anche in farmacia



SERENITY®

SERENITY S.p.A.
www.serenity-care.com



SERENITY®

LIBRETTO INFORMATIVO

REGIONE PUGLIA

*Consigli pratici
per problemi
di incontinenza*

Caro lettore,

oggi grazie ai prodotti di alto livello qualitativo offerti dalla Sua Azienda Sanitaria e alla professionalità del personale incaricato, è possibile vivere con Serenità il problema dell'incontinenza.

L'obiettivo di questo libretto informativo è quello di fornirLe consigli e suggerimenti utili per ridurre al minimo gli inconvenienti legati a questo problema e guidarLa nella scelta degli ausili assorbenti più adeguati alle Sue esigenze.

La gamma dei prodotti Serenity comprende numerosi prodotti in grado di rispondere a ogni tipologia e livello di incontinenza e di offrire sicurezza, discrezione, comfort.

Il segreto per una buona gestione dell'incontinenza nella quotidianità, che permetta alla persona di mantenersi in salute e di continuare serenamente il tenore della propria vita sociale, consiste nella corretta combinazione di tre elementi:

1. La scelta del modello più adatto per lo stile di vita che si conduce
2. La taglia più adeguata alla propria corporatura
3. Il livello di assorbenza appropriato per la tipologia e la gravità dell'incontinenza.

Nelle prossime pagine troverà le informazioni più aggiornate sulla gamma dei prodotti Serenity che la Sua Azienda Sanitaria mette a Sua disposizione: per ogni modello troverà spiegazioni sui dettagli costruttivi, oltre ad un elenco chiaro e sintetico delle taglie e dei livelli di assorbenza a Sua disposizione e alle indicazioni figurate per un corretto indossaggio.

Come leggere la guida prodotti Serenity

1 RICONOSCERE IL LIVELLO DI ASSORBENZA

Il livello di assorbenza dei prodotti è facilmente riconoscibile:

PLUS: livello di incontinenza leggera

NORMAL/EXTRA: livello di incontinenza moderata

SUPER/ULTRA+: livello di incontinenza grave/molto grave

MAXI: livello di incontinenza gravissimo

2 RICONOSCERE LE TAGLIE

- **S:** Piccola/Taglia 38-40
- **M:** Media/Taglia 42-46
- **L:** Large/Taglia 48-52
- **XL:** Extra Large/Taglia 54-56

3 RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I simboli riportati accanto ai prodotti rappresentano le caratteristiche distintive:

-  **Rivestimento esterno traspirante**, silenzioso, morbido, indicato per le pelli più sensibili o per chi sia costretto per molte ore in posizione seduta o sdraiata.
-  **Dermoprotezione a base di Aloe** indicato per le pelli più sensibili
-  **Sistema Controllo Odori:** contrasta la formazione di odori sgradevoli.
-  **Etichette riposizionabili**, consentono ripetute aperture e chiusure del prodotto per facilitarne il controllo e per adeguare la vestibilità alla conformazione fisica.

Consigli pratici per l'indossaggio

- Estrarre i pannolini dalla confezione qualche ora prima dell'indossaggio.
- Prima di indossare il pannolone piegarlo nel senso della lunghezza per conferirgli una forma a conca adatta al raccoglimento dei liquidi.
- Posizionare il pannolone in modo corretto, in linea con la colonna vertebrale e l'ombelico.
- Non indossare mai più di un pannolone alla volta. L'inserimento di un pannolone dentro l'altro non aumenta il potere assorbente.
- Il momento del cambio è facilmente identificabile grazie alla presenza di un indicatore di cambio sul pannolone: la scomparsa della scritta realizzata in inchiostro atossico sul rivestimento esterno indica quando è giunto il momento del cambio.
- Detergere la pelle e le zone intime tra un cambio e l'altro.
- È un Dispositivo Medico Monouso, non riutilizzare mai più di una volta lo stesso ausilio assorbente.

Pannolini per incontinenza LEGGERA

I pannolini Serenity Light sono indicati per contenere le piccole perdite di urina causate da debolezza vescicale. Garantiscono discrezione, comfort e protezione; disponibili in diversi formati e livelli di assorbenza.

Caratteristiche principali



- **Rivestimento esterno traspirante:** offre freschezza e protezione da irritazioni cutanee.
- **Dermoprotezione a base di 5 elementi dermoprotettivi:** protezione da irritazioni e arrossamenti.
- **Elastici laterali morbidi e curvi:** evitano fastidiose frizioni nella zona inguinale.
- **Striscia esterna adesiva:** permette un migliore fissaggio alla biancheria intima.
- **Disponibile anche in versione "Man",** dedicato all'uomo.

TAMPONE A RAPIDO ASSORBIMENTO

TESSUTO A CONTATTO CON LA PELLE IPOALLERGENICO E CON ALOE

SAGOMA ANATOMICA

RIVESTIMENTO ESTERNO TRASPIRANTE

FETTUCCE ELASTICIZZATE CURVE E PIATTE

ADESIVO ESTERNO



Guida all'indossaggio



1 Aprire delicatamente l'assorbente, piegarlo nel senso della lunghezza conferendogli una forma a conca.



2 Rimuovere la striscia adesiva dal rivestimento esterno.



3 Posizionare con cura l'assorbente alla biancheria intima in modo che l'urina confluisca nella parte centrale del tampone.



4 Indossare la biancheria intima assicurandosi che l'assorbente sia stato posizionato correttamente e che aderisca completamente alle parti intime.

Gamma a disposizione

PRODOTTO	ASSORBENZA	PZ/BUSTA	CODICE PRODOTTO	CODICE ISO
Light Normal	Normal	30	37704300000	093004018
Light Extra	Extra	30	37705300000	093004018
Light Super	Super	30	37706300000	093004018
Light - Man	Extra	15	34104300200	093004018



Inquadra il QR CODE per visualizzare il tutorial sull'indossaggio del pannolone

Il consiglio Serenity
Serenity Light "Normal" ed "Extra"
discrezione e sicurezza per ogni momento
della giornata.

Pannolone mutandina modello PANTS

I pannoloni Serenity Pants sono ausili assorbenti monouso chesi indossano come normali capi di biancheria intima: rappresentano la soluzione ideale per incontinenza moderata e grave. Grazie alla fascia addominale elastica e al rivestimento esterno morbido e traspirante, offrono comfort, discrezione e praticità nel cambio. Ideali anche per mantenere l'indipendenza e per soggetti in fase di riabilitazione che riescono a raggiungere il bagno (Toilette Training).

Caratteristiche principali



- **Fascia addominale elastica:** sostiene e mantiene il pannolone nella posizione corretta.
- **Elastici morbidi e curvi:** non stringono e prevengono irritazioni cutanee nella zona inguinale.
- **Sgambatura extra-comfort:** permette maggiore libertà di movimento.
- **Rivestimento traspirante:** freschezza e protezione da irritazioni cutanee.
- **Presenza indicatore di cambio:** la scomparsa della scritta realizzata con inchiostro atossico sul rivestimento esterno indica quando è giunto il momento del cambio.

RIVESTIMENTO ESTERNO MORBIDO E TRASPIRANTE

ELASTICI INGUINALI MORBIDI E CURVI

SGAMBATURA EXTRA CONFORTEVOLE



FASCIA ADDOMINALE MORBIDA ED AVVOLGENTE


TAMPONE A RAPIDO ASSORBIMENTO

INDICATORE DI CAMBIO


Guida all'indossaggio



Indossare l'ausilio come un capo di biancheria intima.

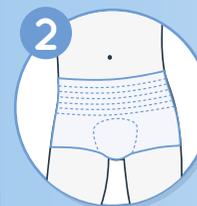

Assicurarsi che l'ausilio aderisca bene al corpo.

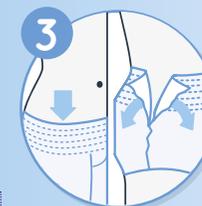

Rimuovere l'ausilio dopo l'uso strappando delicatamente le cuciture laterali.



Dopo l'uso, avvolgere l'ausilio e richiuderlo con l'apposita etichetta.

Gamma a disposizione

PRODOTTO	ASSORBENZA	TAGLIA	PEZZI/BUSTA	CODICE PRODOTTO	CODICE ISO
Pants Soft Dry Extra tg. Small	Extra ▲▲▲▲	S	14	37210200000	093004009
Pants Soft Dry Extra tg. Medium	Extra ▲▲▲▲	M	14	37211400000	093004006
Pants Soft Dry Extra tg. Large	Extra ▲▲▲▲	L	14	37212400000	093004003
Pants Soft Dry Extra tg. Extra Large	Extra ▲▲▲▲	XL	14	37212100000	093004003



Inquadra il QR CODE per visualizzare il tutorial sull'indossaggio del pannolone

Il consiglio Serenity
Ideale anche a tutti gli utilizzatori autonomi, con stile di vita dinamico e vita sociale attiva.

Pannolone MUTANDINA

Il pannolone mutandina è un ausilio assorbente idoneo per la gestione della persona con incontinenza grave e gravissima. Particolarmente indicato per persone allettate e per incontinenza doppia. I pannoloni mutandina Serenity sono disponibili in un'ampia gamma di taglie, livelli di assorbenza e materiali di rivestimento. Per persone autonome e con vita sociale attiva è preferibile l'utilizzo del modello Pants.




■ **PANNOLONE MUTANDINA "SERENITY CLASSIC":** rivestimento esterno in polietilene.



■ **PANNOLONE MUTANDINA "SERENITY SOFT DRY+ CON ALOE":** rivestimento esterno traspirante e tessuto interno a contatto con la pelle con Aloe Vera. Etichette riposizionabili in simil-velcro.



TAMPONE A RAPIDO ASSORBIMENTO

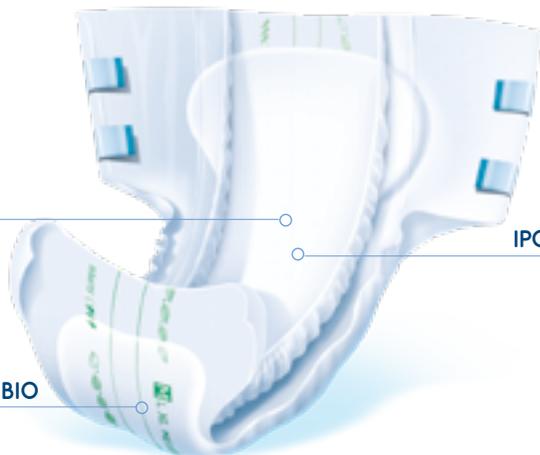

RIVESTIMENTO INTERNO MORBIDO E IPOALLERGENICO

INDICATORE DI CAMBIO

Guida all'indossaggio

	AUTO-INDOSSAGGIO	INDOSSAGGIO SU PERSONA DEAMBULANTE	INDOSSAGGIO SU PERSONA ALLETTATA	
1	Prima del posizionamento piegare in due l'ausilio nel senso della lunghezza conferendogli una forma a conca.	Prima del posizionamento, piegare in due l'ausilio nel senso della lunghezza conferendogli una forma a conca.	1	Prima del posizionamento, piegare in due l'ausilio nel senso della lunghezza conferendogli una forma a conca.
2	Distendere il pannolone su una sedia e disporlo in forma concava pronto per l'indossaggio.	Far indossare l'ausilio al paziente posizionandolo frontalmente e posteriormente alla stessa altezza.	2	Posizionare il paziente sdraiato sul fianco e distendere il pannolone sul letto.
3	Sedersi sopra ed appoggiare sull'addome il lembo anteriore, tirandolo verso l'alto con le mani.	Chiudere frontalmente l'ausilio fissando le 4 etichette adesive.	3	Ruotare la schiena del paziente posizionandolo sul pannolone.
4	Tirare verso l'alto anche la parte posteriore. Fissare gli adesivi sulla parte anteriore.	Controllare che l'ausilio aderisca bene alla zona inguinale senza stringere.	4	Adattare il pannolone attorno al corpo. Fissare correttamente gli appositi adesivi.

Gamma a disposizione

PRODOTTO	ASSORBENZA	TAGLIA	PEZZI/BUSTA	CODICE PRODOTTO	CODICE ISO
Pannolone mutandina Soft Dry Aloe, Extra, taglia Small	Extra	S	30	37199300000	093004009
Pannolone mutandina Soft Dry Aloe, Extra, taglia Medium	Extra	M	30	37200300000	093004006
Pannolone mutandina Soft Dry Aloe, Extra OC, taglia Large	Extra	L	30	37201300010	093004003
Pannolone mutandina Soft Dry Aloe, Super, taglia Medium	Super	M	30	39132300020	093004006
Pannolone mutandina Soft Dry Aloe, Super, taglia Large	Super	L	30	39133300020	093004003
Pannolone mutandina Classic Super taglia Extra Large	Super	XL	30	37584150010	093004003

Inquadra il QR CODE per visualizzare il tutorial sull'indossaggio del pannolone



Posizione in piedi



Posizione supina

Il consiglio Serenity
Disponibile anche la taglia Extra Large (XL) per persone di corporatura robusta.

Pannolone SAGOMATO

Il pannolone sagomato è un ausilio assorbente idoneo per qualsiasi tipo e livello di incontinenza, da moderata a grave. La forma anatomica dell'ausilio lo rende confortevole durante l'uso e pratico per il cambio.

Caratteristiche principali

- **Sagoma anatomica**, segue la naturale fisionomia del corpo e permette una maggiore libertà di movimento.
- Da utilizzare in combinazione con le speciali **mutandine elasticizzate lavabili e riutilizzabili**.
- **Presenza indicatore di cambio**: la scomparsa della scritta realizzata con inchiostro atossico sul rivestimento esterno indica quando è giunto il momento del cambio.

RIVESTIMENTO INTERNO MORBIDO E IPOALLERGENICO

TAMPONE A RAPIDO ASSORBIMENTO

INDICATORE DI CAMBIO

SAGOMA ANATOMICA

BARRIERE ANTIFUORIUSCITA

Guida all'indossaggio



PERSONE AUTOSUFFICIENTI



1 Stendere il pannolone conferendogli una forma a conca.



2 Prima di posizionare il pannolone indossare le mutandine a rete portandole a metà coscia.



3 Mantenendo il pannolone piegato, farlo scorrere tra le gambe, alla stessa altezza sia davanti che dietro. Posizionare posteriormente la parte più ampia del pannolone.




4 Allargare a ventaglio la parte anteriore e posteriore del pannolone. Alzare le mutandine in modo che racchiudano comodamente il pannolone.




PERSONE ALLETTATE




1 Stendere il pannolone conferendogli una forma a conca.

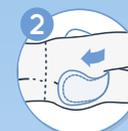

2 Prima di posizionare il pannolone indossare le mutandine a rete portandole a metà coscia.

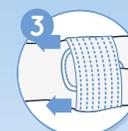

3 Girare la persona sul fianco e, mantenendo il pannolone piegato, farlo scorrere tra le gambe alla stessa altezza sia davanti che dietro.

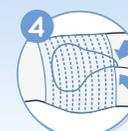

4 Allargare a ventaglio la parte anteriore e posteriore del pannolone. Alzare le mutandine in modo che racchiudano comodamente il pannolone.

Gamma a disposizione

PRODOTTO	ASSORBENZA	PZ/BUSTA	CODICE PRODOTTO	CODICE ISO
Pannolone sagomato Soft-Dry+ Aloe, Plus	Plus	30	37916300020	093004018
Pannolone sagomato Soft-Dry+ Aloe, Extra	Extra	30	37917300020	093004015
Pannolone sagomato Soft-Dry+ Aloe, Super	Super	30	37918300020	093004012
Pannolone sagomato Soft-Dry+ Aloe, Maxi	Maxi	30	37919300020	093004012

Inquadra il QR CODE per visualizzare il tutorial sull'indossaggio del pannolone



Posizione in piedi



Posizione supina

Il consiglio Serenity
Il Pannolone sagomato Serenity Soft-Dry+ Aloe
"Maxi" offre la massima sicurezza per qualsiasi
livello e tipologia di incontinenza.

Pannolone RETTANGOLARE

Ausilio per incontinenza leggerissima, di dimensioni ridotte, dalla forma rettangolare non anatomica.



Gamma a disposizione

PRODOTTO	PZ/BUSTA	CODICE PRODOTTO	CODICE ISO
Pannolone rettangolare con barriera impermeabile	30	37806300080	093004021
Pannolone rettangolare senza barriera impermeabile	30	37807300080	093004021

Mutande ELASTICIZZATE

Le mutandine a rete elasticizzate permettono di posizionare in modo sicuro i pannoloni sagomati ed i pannoloni rettangolari. Prive di cuciture interne, proteggono la pelle da frizioni e arrossamenti.

Lavabili fino a 20 volte a 60° in lavatrice.



1 Indossare la mutanda elasticizzata come un normale capo di biancheria intima, tenendo le cuciture esterne non a contatto con la pelle.


2 Sollevare lateralmente la mutandina facendo in modo che le strisce colorate si dispongano in linea orizzontale.

Gamma a disposizione

PRODOTTO	TAGLIA	PZ/BUSTA	CODICE PRODOTTO	CODICE ISO
Mutandine elasticizzate a rete taglia Small	S	3	37279000010	093009009
Mutandine elasticizzate a rete taglia Medium	M	3	37327000010	093009006
Mutandine elasticizzate a rete taglia Large	L	3	37308000010	093009003
Mutandine elasticizzate a rete taglia Extra Large	XL	3	37281000010	093009003

Traversa SALVAMATERASSO

Le traverse Serenity sono ausili adatti per la protezione della biancheria da letto o di altre superfici di appoggio durante il cambio del pannolone.

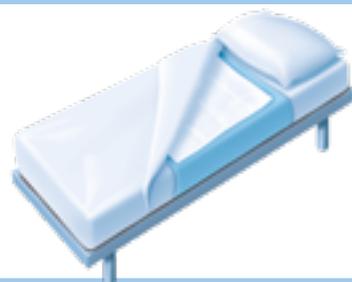

Gamma a disposizione

PRODOTTO	MISURA (CM)	PZ/BUSTA	CODICE PRODOTTO	CODICE ISO
Traversa Classic non rimboccabile cm. 60 x 90	60x90	30	37642300050	181215006
Traversa Classic rimboccabile cm. 80x180	80x180	30	37643300050	181215003

*Il consiglio Serenity
La traversa 80x180 è ideale per proteggere in sicurezza la
biancheria piana del letto*

Pannolone CON CHIUSURA A CINTURA

Il pannolone mutandina a cintura è un ausilio assorbente dotato di una cintura di fissaggio addominale.



Inquadra il QR CODE per visualizzare il tutorial sull'indossaggio del pannolone



Posizione in piedi



Posizione supina

Guida all'indossaggio



PERSONE AUTOSUFFICIENTI



1 Prima del posizionamento piegare in due l'ausilio nel senso della lunghezza conferendogli una forma a conca.



2 Chiudere le due fasce della cintura intorno alla vita fissando correttamente gli adesivi.



3 Appoggiare sull'addome il lembo anteriore tirandolo verso l'alto con le mani.



PERSONE ALLETTATE



1 Prima del posizionamento piegare in due l'ausilio nel senso della lunghezza conferendogli una forma a conca.



2 Posizionare il paziente sdraiato sul fianco, distendere il pannolone sul letto e chiudere la cintura intorno alla vita fissando correttamente gli adesivi.



3 Far passare in mezzo alle gambe il lembo anteriore tirandolo verso l'alto con le mani.

Gamma a disposizione

PRODOTTO	ASSORBENZA	TAGLIA	PEZZI/BUSTA	CODICE PRODOTTO	CODICE ISO
Pannolone a cintura Veste Soft Dry, Extra, taglia Medium	Extra	M	15	37340000000	093004006
Pannolone a cintura Veste Soft Dry, Extra, taglia Large	Extra	L	15	37341000000	093004003

Come ricevere i prodotti Serenity

- ✓ Per ricevere **gratuitamente presso il Suo domicilio** gli ausili assorbenti "Serenity" è necessario rivolgersi al Distretto Socio Sanitario di residenza negli orari previsti di apertura al pubblico muniti di prescrizione del medico specialista di struttura pubblica con la diagnosi di incontinenza stabilizzata. Il personale Serenity sarà a Sua disposizione per illustrarLe le caratteristiche degli ausili assorbenti e fornirLe consigli personalizzati per la corretta gestione dell'incontinenza in base alle Sue necessità. A seguito dell'autorizzazione da parte della Asl, gli ausili assorbenti a Lei prescritti verranno consegnati presso il Suo domicilio, nel totale rispetto della Sua privacy.
- ✓ Qualche giorno prima della data prevista di consegna, il personale incaricato Serenity **La contatterà telefonicamente** per avvisarLa e per concordare con Lei la fascia oraria per il passaggio del corriere.
- ✓ Al momento della **consegna**, l'incaricato Serenity Le farà firmare il documento di trasporto. Si ricordi di controllare l'esatta corrispondenza tra ciò che è indicato

sul documento e ciò che Le è effettivamente stato consegnato (quantità e tipologia dei prodotti).

Gli ausili assorbenti che Le vengono consegnati SONO DI PROPRIETÀ DELLA AZIENDA SANITARIA. Nel caso in cui gli ausili assorbenti non fossero più necessari o fossero in quantità eccessiva rispetto al Suo reale fabbisogno è necessario informare la sua ASL e restituire le buste integre inutilizzate.

ATTENZIONE! Il corriere Serenity effettuerà la consegna a titolo completamente gratuito. Diffidi da persone che Le richiedono ricompense in denaro o altro e, nel caso ciò succedesse, la preghiamo di fare segnalazione al numero verde Serenity.